



Comment Utiliser le DUO /ULT (DUO for Ultrasounds)

1

Désinfectez les mains immédiatement après et avant le contact avec un patient.

2

Enfilez les gants.

3

Enlevez-les clés rattachées au bec de la pompe. Veuillez les remettre après usage.

4

Lors du premier usage, poussez jusqu'à 4 fois pour faire sortir une dose de mousse. Appliquez cette dose de dioxyde de chlorure bien sur la surface de la sonde/instrument.

5

Servez-vous d'une lingette classique pour bien appliquer la mousse de façon à mettre toute la surface de la sonde en contact avec le dioxyde de chlorure.

6

Après usage débarrassez-vous de cette lingette comme déchet clinique normal.

7

Laissez secher la surface de la sonde/instrument afin de se rassurer d'un délai de contact à 30 secondes.

