

Nettoyage sonde echo

Patients infectieux

oui

non

Gant de latex sur la sonde avec gel dedans

Nettoyer la sonde avec de l'eau et sécher avec du papier

Porter un tablier jaune et 2 paires de gants (ou changer de gants avant nettoyage)

Séchage à l'air libre

Après examen, retirer une paire de gants

Sonde prêt à l'emploi

Nettoyer la sonde avec de l'eau et sécher avec du papier

Appliquer la mousse Tristel DUO® sur la sonde entourée d'une compresse et laisser sécher à l'air libre

Sonde prêt à l'emploi

Nettoyage de la salle, nettoyage du clavier et des câbles avec les lingettes Trigene®, retirer le tablier et les gants et jeter dans une poubelle jaunes avant de la sceller